

# Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik niet reageer op een alarm?

De Medido geeft om de 10 minuten een alarm. Op het moment dat u uw medicatie na 75 minuten (standaard instelling) nog niet heeft uitgenomen, stuurt de Medido een melding naar de zorg. Zij zullen u dan bellen. Mochten zij geen contact met u kunnen krijgen, dan komen zij bij u langs.

N.B. U kunt het gemiste zakje tot 1 uur vóór het volgende medicatiemoment alsnog uitnemen door ca. 5 seconden op de OK-knop te drukken. Anders zal dit zakje samen met het zakje van het volgende uitgiftemoment uit de dispenser komen. Het overgeslagen zakje blijft nu dicht en het nieuwe zakje is ingesneden. Overleg in deze situatie altijd met uw zorgverlener.

Hoe kan ik medicatie meenemen als ik even van huis ga?

Om uw medicatie eerder uit te nemen, drukt u ca. 5 seconden op de OK-knop tot u een pieptoon hoort. Het eerstvolgende zakje(s) komt nu uit de dispenser en de Medido zal voor dat tijdstip geen melding meer geven. Herhaal dit indien u meerdere zakjes mee wilt nemen. Dit is standaard mogelijk tot maximaal 24 uur van tevoren.

Kan de Medido ook attenderen voor medicatie die niet in de medicijnrol past?

Ook voor bijvoorbeeld zalf, een inhalator of insuline kan een aparte melding worden ingesteld. De Medido zal dan op de gewenste tijden een signaal geven. U dient in dit geval ook op de OK-knop te drukken maar er wordt geen zakje uitgegeven. Laat uw zorgverlener hiervoor contact opnemen met Medido Support.

Wat moet ik doen als mijn medicatie wijzigt?

Medicatiewijzigingen worden door de apotheek automatisch doorgevoerd in de eerstvolgende medicijnrol. Ook als er tussentijds een wijziging moet worden aangebracht in de huidige medicijnrol, dan blijft de apotheek op de gebruikelijke wijze hiervoor zorg dragen. De Medido verandert dus niets aan de bestaande werkwijze rondom medicatie wijzigingen.

Wel is het handig om bij wijzigingen contact op te nemen met uw zorgverlener. Om fouten te voorkomen vragen wij u om de wijzigingen door te geven aan Medido support.

# Medido aanvragen

De Medido is verkrijgbaar via uw thuiszorg organisatie. Zij kunnen de Medido voor u aanvragen indien u op dit moment ondersteuning krijgt bij uw medicatie-inname.

## Kosten?

Als u een indicatie voor medicatie-aanreiking heeft, of als u ondersteuning van de thuiszorg nodig heeft bij uw medicatie-inname, dan kan de Medido kosteloos aan u beschikbaar worden gesteld door uw thuiszorgorganisatie.



## Heeft u vragen?

Neem dan een kijkje op de website [www.medido.com](http://www.medido.com)

Verrijgbaar bij

versie 200901.1.720

**medido**  
slim, samen, met zorg



Aanreiken met **Medido**  
medicatie met zorg

# Medicatiebegeleiding op afstand

## Wat is het?

De Medido is een slimme medicijndispenser, die werkt met een volautomatisch uitgiftesysteem. Het zorgt ervoor dat uw cliënten de juiste medicijnen op het juiste moment ontvangen en eraan herinnerd worden deze in te nemen.

## De kracht van Medido

**Zekerheid.** Bevordert therapietrouw door de juiste medicatie aan te reiken op de voorgeschreven momenten.

**Gemak.** U hoeft alleen zorgmomenten in te zetten als deze echt nodig zijn.

**Vrijheid.** Voor u en uw cliënten, door het bevorderen van zelfredzaamheid.

**Rust.** Door efficiëntere inzet van waardevolle handen aan het bed.



## Hoe werkt het?

### 1 Medido vullen met medicijnrol

Uw apotheek kan uw medicatie verpakken in een zogenaamde medicijnrol. Voor ieder moment van de dag dat u medicijnen moet slikken, worden er één of meerdere zakjes gemaakt. Dankzij deze medicijnrol hoeft u de medicatie niet meer te sorteren op tijdstip van inname. Het eerstvolgende zakje bevat altijd de juiste medicatie voor het volgende medicatiemoment. De Medido wordt gevuld met deze medicijnrol.

### 2 Herinnerings- signaal

Wij bij Medido programmeren de tijden die bij uw medicijnrol horen op afstand in de dispenser. Middels een signaal wordt u op het juiste tijdstip eraan herinnerd uw medicatie in te nemen.

### 3 Uw medicijnen uitnemen

Wanneer het herinneringssignaal klinkt hoeft u alleen maar op de OK-knop te drukken. Het zakje met uw medicijnen komt vervolgens opengesneden uit de dispenser. U heeft dus geen schaar nodig om de medicatie uit te nemen.

### 4 Medicijnen vergeten uit te nemen? Alarm naar de zorg!

De dispenser staat permanent in verbinding met uw zorgverleners. Zij nemen contact met u op als u niet reageert op het signaal van de dispenser.

“de zakjes worden opengesneden, dus u hebt geen schaar nodig om de medicatie uit te nemen”

“De juiste medicijnen,  
altijd op het juiste  
moment”

